


Klinischer Einsatz

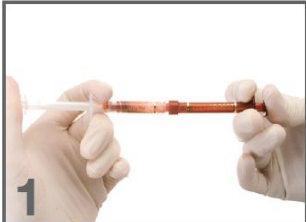

1 Schutzbrille und Schutzkleidung bei Patient und Behandlungsteam anlegen. Prüfen, ob Spritzen fest verbunden sind. Zum Anmischen des Opalescence Boost-Aufhellungsgels der Anleitung auf der Rückseite folgen.



2 Zuletzt das gesamte Gel in die rote Spritze drücken. Die Spritzen trennen und einen Micro 20 ga FX Tip fest auf die rote Spritze drehen. Den Fluss des Gels extraoral auf einem Mischblock prüfen; wenn Widerstand zu fühlen ist, nicht mit Gewalt pressen. Tip ggf. ersetzen und Fluss erneut prüfen.



3 Im Mund die Aufbiss-Hilfe IsoBlock sowie einen selbstspannenden Lippenspreizer einsetzen. Zähne und Gingiva absprayen und gründlich trockenblasen.



4 Einen Micro 20 ga Tip fest auf die OpalDam / OpalDam Green-Spritze drehen; Materialfluss prüfen. Ein fortlaufendes Band über den Gingivalrand applizieren, dabei ca. 0,5 mm auf den Schmelz überlappen lassen. Den Streifen distal der letzten Zähne, die aufgehellt werden sollen, beginnen und enden lassen. Ca. 4-6 mm breit und ca. 1,5-2 mm dick auftragen. OpalDam auch durch offene Interdentalräume pressen.



5 Die OpalDam-Abdeckung lichterhärten, 20 Sekunden pro Zahnbogen. Dabei an der Zahnreihe entlangführen. Die Aushärtung sorgfältig mit einem Instrument prüfen.



6 Opalescence Boost 40% auf die Zähne applizieren, in einer 0,5-1,0 mm dicken Schicht. Die Labialflächen bedecken und den Auftrag leicht auf die Inzisalkanten bzw. Höcker Spitzen ausdehnen. Das Gel 20 Min. einwirken lassen. Eine Lichtaktivierung ist nicht erforderlich.



7 Das Gel mit einem Luer Vacuum Adapter und einer SurgiTip-Kanüle oder einer chirurgischen Absaugkanüle entfernen. Entfernt ist, die Zähne intensiv absprayen und gründlich trockenblasen. Schritte 6 und 7 und dabei sorgfältig absaugen. Nicht mit Wasser spülen. Schritte 6 und 7 zweimal wiederholen, oder bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. In einer Sitzung nicht mehr als max. 3 x auftragen.



8 Wenn nach der letzten Applikation das gesamte sichtbare Gel durch Absaugen chirurgischen Absaugkanüle entfernen ist, die Zähne intensiv absprayen und gründlich trockenblasen. Schritte 6 und 7 zweimal wiederholen, oder bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. In einer Sitzung nicht mehr als max. 3 x auftragen.



9 Am Ende der Behandlung mit der Spitze eines Instrumentes unter die OpalDam Schicht fahren und sie damit abheben. Sicherstellen, dass kein OpalDam in Zahnfleischtaschen oder Interdentalräumen verblieben ist.



10 Die Zahnfarbe prüfen. Sind die Verfärbungen noch nicht zufriedenstellend beseitigt und keine wesentlichen Zahnempfindlichkeiten aufgetreten, den Patienten in 5 Tagen zur nächsten Behandlung erneut einbestellen.




Diese Information ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die umfassenden Anleitungen, die jeder Opalescence Boost-Packung beigelegt sind.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.


Klinische Abbildungen mit freundl. Genehmigung von Ultradent Products.

Anmischen

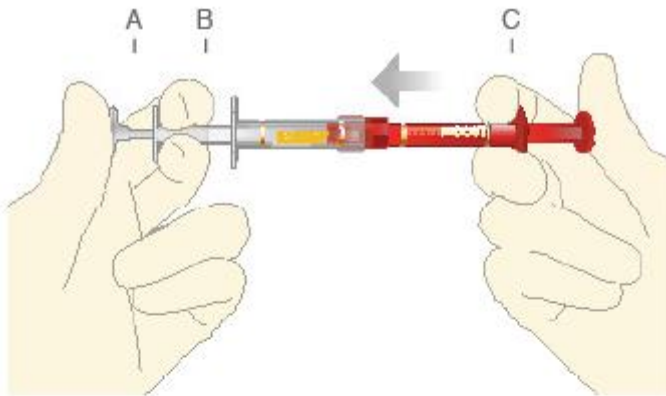


1.

Vor dem Mischen sicherstellen, dass beide Spritzen fest miteinander verschraubt sind. Stempel der roten Spritze (C) eindrücken, damit das gesamte Gel in die klare Spritze (B) bringen.

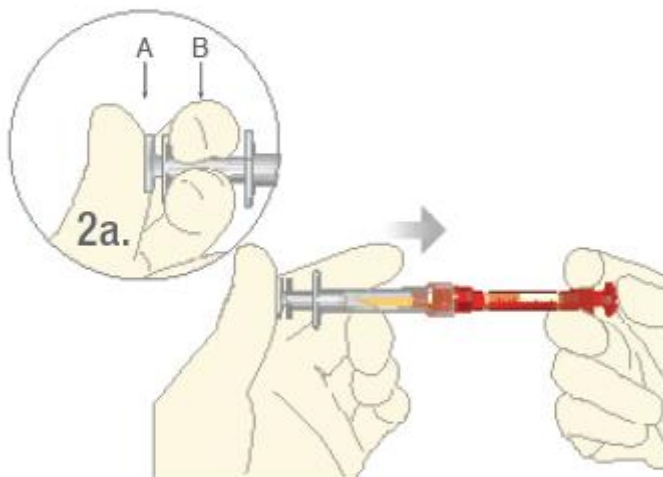

2.

Nun kräftig auf den kleinen klaren Stempel (A) drücken und ihn komplett im größeren klaren Stempel (B) versenken (siehe separate Abb. 2a). Dann mit dem klaren Stempel (A/B) das Gel zurück in die rote Spritze drücken.

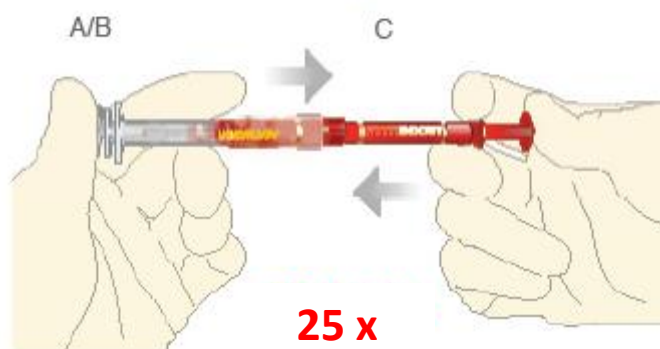

3.

Das Gel zur Anmischung und Aktivierung zwischen der roten (C) und der klaren (A/B) Spritze mit den Daumen hin- und herdrücken, mindestens 25mal (12-13 mal in jede Richtung).

25 x

Unmittelbar nach dem Anmischen Spritzen trennen und auf die rote Spritze zur Applikation einen Micro 20 ga FX Tip aufsetzen. Soll nicht sofort appliziert werden, die Spritze mit einer Luer-Lock-Kappe verschließen.

Im Kühlschrank gelagert, ist angemischtes Opalescence Boost-Gel 10 Tage lang verwendbar.