


Adhäsivtechnik bei direkten Komposit-Restaurationen mit PQ1 Step by Step

Die Materialien:



Ultra-Etch	Spritzenansätze für Ultra-Etch	PQ1	Spritzenansätze für PQ1
Phosphorsäure-Gel, 35%ig, blau, zum Anätzen von Schmelz und Dentin, selbstlimitierend (im Dentin) gegen unkontrollierte Äztiefen	Inspirial Brush Tip (f. Flächen), Blue Micro Tip (f. punkt- u. linienförm. Ätzen), Nano Tip (f. Feinapplikation auch unter Vergrößerung)	Einkomponenten-Bonding, lighthärtend, für Komposit-Restaurationen und Reparaturen, kein vorzeitiges Verdunsten des Lösungsmittels	Inspirial Brush Tip (für Flächen), Black Micro FX Tip (für schlitzförmige und Tunnel-Präparationen)

Der Ablauf:

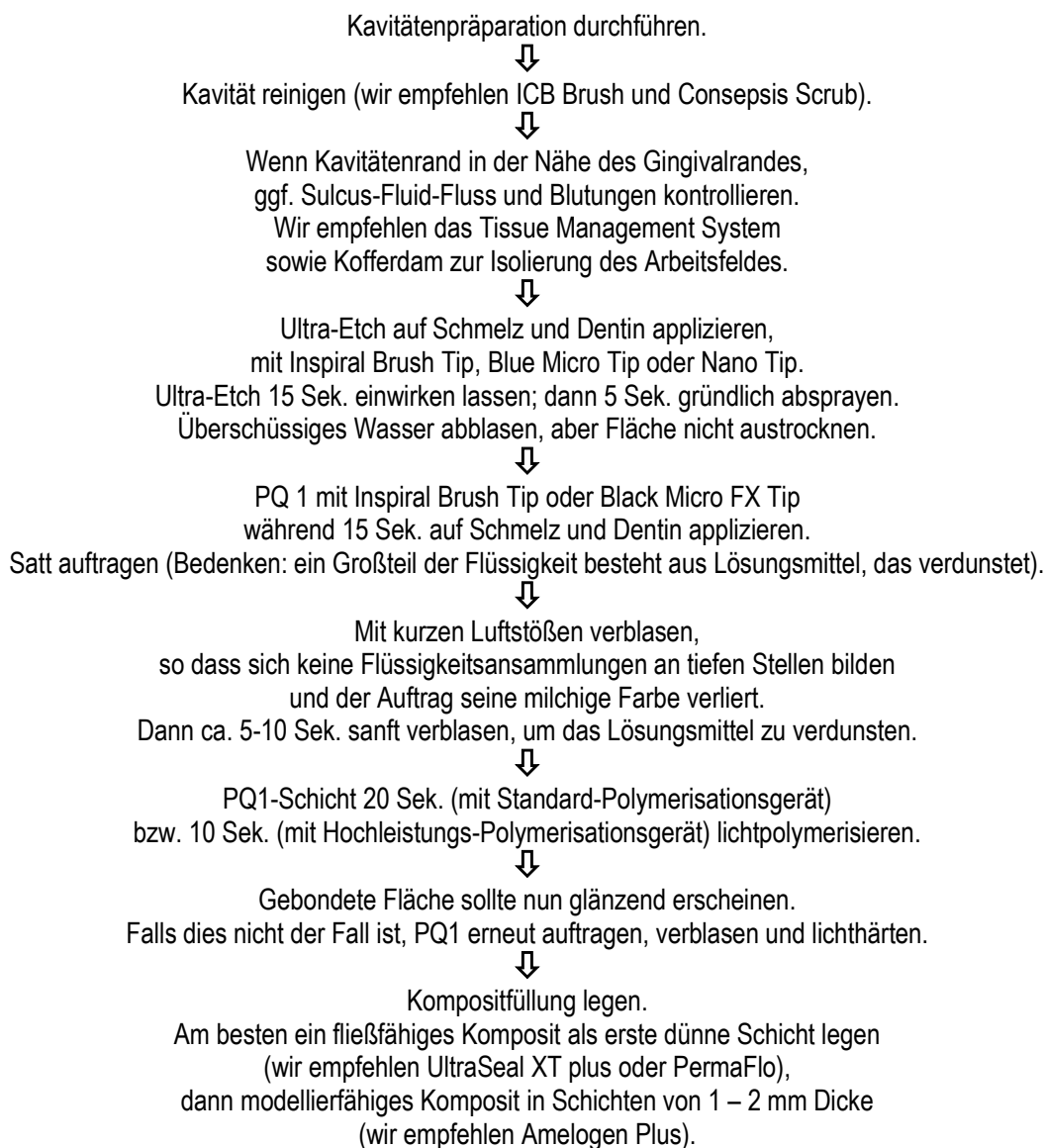

**Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.**