




## SpeedMix™ Syringe - Anmischtechnik

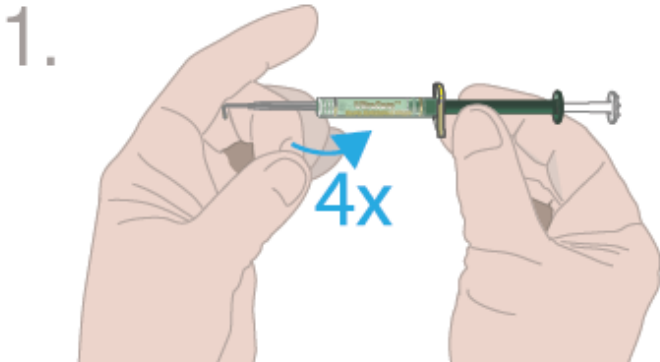


4 x gegen die Hülse schnippen, um das Pulver zu lockern.

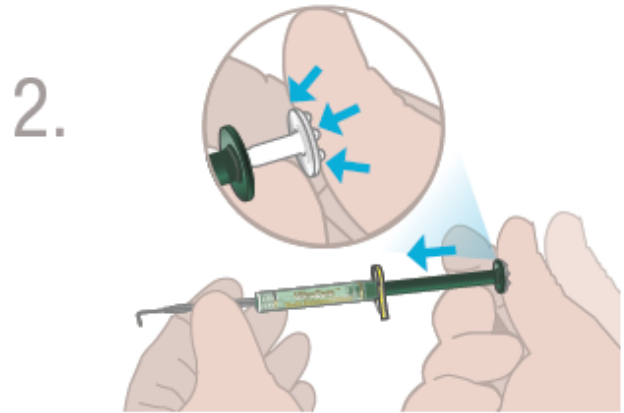


Den weißen Stempel fest in den grünen Stempel drücken, um die Flüssigkeit in die Pulverkammer zu bringen.

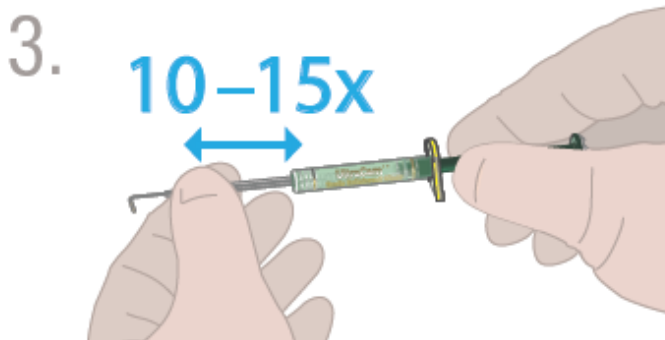


Das Metall-Stäbchen noch nicht herausziehen. Den Kunststoff-Mixing Tip fassen und 10-15 x hin und her schieben.

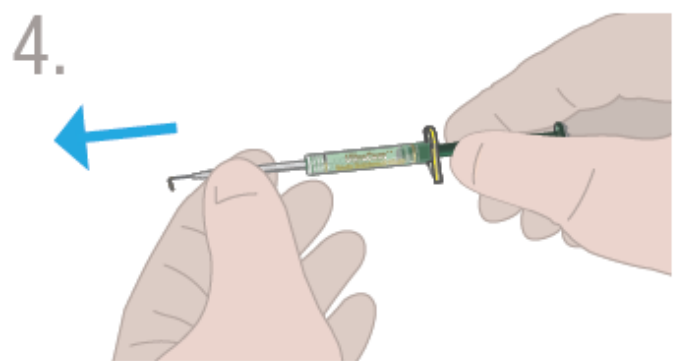

Den Mixing Tip bis zum Anschlag herausziehen.

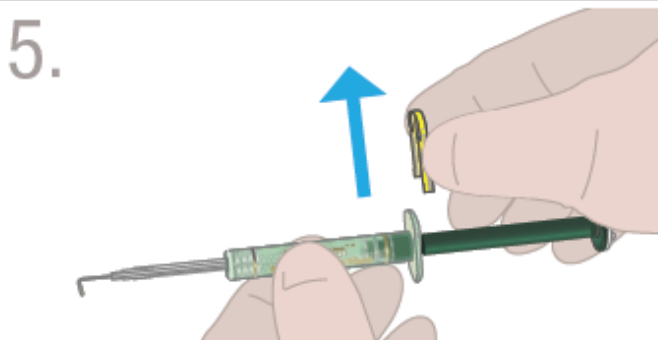

Die gelbe Klammer entfernen.

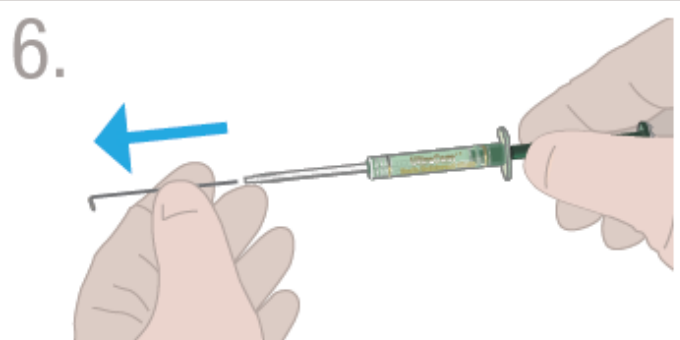

Das Metall-Stäbchen entfernen.



Material in Krone, Brücke etc. einbringen.

QR-Code mit Smartphone scannen, um ein Video (30 Sek.) zur SpeedMix-Spritze in Aktion zu sehen!

