

オパールストラ 歯科用口腔清掃キット

詳細:

オパールストラは6.6%の塩酸と炭化ケイ素微粒子を含有した水溶性ペーストの歯科用口腔清掃材です。

適応:

ホームホワイトニング材で効果が見られなかったフッ素症による変色や表面(深さ0.2mm)の白色、茶色等のエナメル質欠損の修正などにご使用いただけます。

使用方法:

1. 使用前にベースラインのシェードを確認してください。
必要であれば、写真を撮ってください。
2. エナメル質欠損の場合は、適切な治療を施してください。
警告:本品は塩酸を含有するため、使用中は局部を適切な方法で隔離してください。患者および歯科医療従事者は、保護メガネを着用してください。
3. ラバーダムとクランプを使い、治療を施す局部を隔離します。
4. さらに軟組織を保護するために、少量のラバーダムシーラーまたは光重合型硬化レジンバリアを歯肉縁に施します。
5. ラバーダムを装着し、歯肉縁の境の部分で反転させます。
注記:0.1~0.3mm以上の低石灰化には、水冷式ファイングリット・テーパードダイヤモンドバーを用い、本品使用前に5~10秒間軽く清掃します。
6. オパールストラシンジからルアーロックキャップを取り外し、ホワイトマックチップをしっかりと取り付けます。
7. 口腔内での使用前にチップから均等に材料が流出されるかを確認してください。
8. 局部に約1.0mmの厚さで歯面に塗布します。
9. 低速(約500rpm)の歯磨カップを使用し、1回につき60秒間研磨します。
10. 歯面に残存する研磨材を吸引した後、口をゆすぎ、必要であれば8.~9.の処置を繰り返します。
11. 口腔内を洗浄後、処置部位からラバーダムおよびシーラーを取り外します。患者へ再度しっかりと口をゆすぐよう指導してください。



使用前



使用后

12. 歯面エナメル質に歯科用フッ化物を4分間適用します。

注記:本品をホームホワイトニング処置前又は処置後にご使用いただくことで、歯をより白くすることができます。ただし、ホームホワイトニング処置後に本品を使用する場合、処置が完了してから24時間後にしてください。

処置後に過敏症が見られる場合は、硝酸カルウム等の歯科用知覚過敏抑制剤を使用してください。

重度の石灰化が見られる部位、またはしみの種類によっては、治療の効果が得られない場合もあります。加えて審美治療を施す場合は、付着状態および色が安定するまで、ホワイトニング処置が完了してから少なくとも2週間の期間を置いてください。

使用上の注意および注意事項:

1. 軟組織との接触は避けてください。本品が軟組織に接触した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
2. 本品を使用する際は、患者、歯科医療従事者は保護メガネを着用してください。
3. 本品を使用する前に添付文書および取扱説明書を熟読してください。
4. 口腔内で使用する前にチップからの流動性が均等であるか確認してください。抵抗を感じる場合は、チップを取り替えて再度流量を確認してください。本品にはホワイトマックチップのみをご使用ください。
5. 添付文書および取扱説明書に記載される成分にアレルギーがある、または過敏症の患者には、本品を使用しないでください。アレルギー反応が見られる場合は、医師に相談してください。
6. 本品は注入用ではありません。
7. 本品を直火したり、直射日光に当てるなどしないでください。
8. 使用後はシリンジのキャップを閉め、中性消毒で殺菌してください。
9. 使用済みチップおよびシリンジは再使用禁止のため適切に廃棄してください。

注記: オパールーストラおよび関連製品に関する詳細は、www.ultradentjapan.comにアクセスしてください。



図1 ラバーダムを歯肉縁に装着する前に、まず少量のオパール®コーキングを歯肉縁および歯間空隙に塗布してください。



有効期限内にご使用ください。



交叉感染防止のため、再使用禁止

REF

製品番号




取扱説明書をご覧ください。

LOT

ロット番号

R_X

本品は歯科医師の処方のもと、歯科医療従事者のみご使用いただけます。

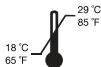

推奨している保管温度

* 室温で問題ありません。



刺激性

製造販売業者

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル

電話番号：0120-060-751

製造業者

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)



Manufactured by Ultradent Products, Inc.
505 West 10200 South, South Jordan, UT 84095 Made in USA

 **ULTRADENT**
JAPAN 株式会社

10907 -JP.1 042011