

# VALO キュアリングライト/VALO コードレス クイックマニュアル

■使用方法：VALOには3つのモードがあり、ボタンを長押しすることでモードを変更頂けます。

\*テストに使用されるメーターの種類、および精度により異なります。

## 一般歯科

モード 出力レベル	スタンダードパワー ● 1000mW/cm <sup>2</sup> *	ハイパワー ● 1400mW/cm <sup>2</sup> *	プラズマ/エキストラパワー ● 3200mW/cm <sup>2</sup> *
電源ボタン 時間ライト モード/ステータスライト 時間/モード変更ボタン			
	5秒 10秒 15秒 20秒	1秒 2秒 3秒 4秒	3秒のみ
レイヤー(2mm)ごとの硬化時間	10秒硬化 1回	4秒硬化 2回	3秒硬化 1回
最終硬化	20秒硬化 1回	4秒硬化 3回	3秒硬化 2回

## 矯正歯科

金属およびセラミック製ブラケット	20秒硬化 1回	4秒硬化 3回	3秒硬化 2回
------------------	----------	---------	---------

※ 2回以上照射する場合は、各照射に3〜7秒の間隔を設けてください。  
※ オパールダムOPの硬化を行う際は、スタンダードモードのみをお使いください。

※VALOコードレスにはもう一つバッテリーの残量を示すライトがあります。  
残量が少なくなると赤く点灯し、電池が切れる際にはピープ音で警告します。



■お願い：本品を安全にご使用頂くために、以下の点を必ずご確認ください。

- ①必ずご使用になる前に付属の添付文書及び取扱説明書を熟読してください。
- ②患者及び歯科医療従事者は、「ウルトラデント UV オレンジ保護メガネ」もしくは「VALO ライトシールド」を併用し、光を直視しないようにしてください。
- ③火傷には十分注意してください。レンズを軟組織に近づけたり、軟組織の一部に光を当て続けたりした場合、火傷する恐れがあります。レンズと軟組織は最低でも2mm以上の間隔をあけて照射してください。熱さを感じた場合は、本品の使用を中断してください。
- ④コンポジットレジジンやボンディング材などの光硬化する製品は、一部高出力の光に対応していないものがあります。上記の製品をご使用になられる場合は取扱説明書を良くお読みになり、プラズマ/エキストラパワーモードが対応しているかを確認してください。高出力未対応の場合は、メーカーの推奨する方法で光照射を行ってください。
- ⑤本品の改造や加工等は行わないでください。

**ULTRADENT**  
JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町1-7-5 初台村上ビル4F

TEL: 0120-060-751 FAX: 03-5365-1759