

水酸化カルシウムペースト

ウルトラカル XSJ キット  
ウルトラカル XSJ ナビチップキット  
ウルトラカル XSJ リフィル

医療機器承認番号 21700BZG00025000

## 使用説明書



このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本品のご使用に際しては、この使用説明書を最後までお読みになり、正しくご利用ください。

また、お読みになった後は、本書を必ず保管してください。尚、この使用説明書に記載されている内容は、製品の改良、新たな知見等で予告なく変更されることがあります。使用説明書は製品をお買い上げの都度差し替えていただきますようお願い申し上げます。

## 本製品の特徴

---

- ・ 本製品は水酸化カルシウムを 35% 含有し、pH12.5 で強アルカリによる抗菌作用があります。
- ・ 専用のシリンジとチップにより、正確に抽出することができます。
- ・ 流動性が高く、スムーズに根尖付近まで注入できます。
- ・ X 線造影性があり、予後の観察を容易にします。

## 適用

---

### ■ 暫間根管充填

- ・ 感染根管治療
- ・ 抜髄処置後
- ・ 仮根管充填

### ■ 直接覆罩

- ・ 露髄面の暫間覆罩

※ 覆罩処置には操作性に優れたウルトラブレンドプラスJのご利用をお勧めいたします。

## セット内容

---

### ■ ウルトラカル XSJ キット

- ・ウルトラカル XSJ 1.2mL 入りシリンジ 2本
- ・エンドイーズチップ 22G (根管注入用) 10個
- ・ブラックミニチップ 10個

### ■ ウルトラカル XSJ ナビチップキット

- ・ウルトラカル XSJ 1.2mL 入りシリンジ 4本
- ・ナビチップ 29G 17mm/21mm/25mm/27mm 各5個 計20個

### ■ ウルトラカル XSJ リフィル

- ・ウルトラカル XSJ 1.2mL 入りシリンジ 4本

## 使用方法

---

### ■ 暫間根管充填

1. エンドイーズチップ 22G 又はナビチップ 29G をシリンジに取り付けます。



チップはシリンジにしっかりとねじ込んでください。



プラスチック製のチップは根管内から抜けなくなる可能性がありますので根管充填には使用しないでください。

2. シリンジのプランジャーを手の平に当てシリンジを保持し、チップを根管内に挿入し、充填します。ナビチップをご使用の際は、ゆっくりとチップを引き出しながら充填してください。



根管充填を行う前には必ず根管を清掃してください。



充填の際は、ゆっくりと一定の圧力で行ってください。スムーズに出ない場合は、新しいチップに交換してください。

3. 使用後はシリンジからチップを外し、再度キャップをしっかりと閉めて常温、暗所にて保存してください。
4. ウルトラカル XSJ は根管内で硬化しませんので、症状の改善を確認（一週間ごとに2回程度適用）した後、ウルトラカル XSJ を根管内から除去し、通法に従い根管充填を行います。

#### ■ 直接覆罩（暫間覆罩処置）

1. ブラックミニチップをシリンジに取り付けます。



チップはシリンジにしっかりとねじ込んでください。

2. シリンジのプランジャーを手の平に当てシリンジを保持し（図1）、露髄した部分に少量のウルトラカル XSJ を塗布します。

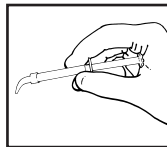


図 1



充填の際は、ゆっくりと一定の圧力で行ってください。スムーズに出ない場合は、新しいチップに交換してください。


3. 使用後はシリンジからチップを外し、再度キャップをしっかりと閉めて常温、暗所にて保存してください。

## 重要注意事項

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---

1. 本品は所定の用途・用法以外には使用しないでください。
2. 本品は歯科医療有資格者のみが使用してください。
3. 本品の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処理を行ってください。
4. 本品は強アルカリです。使用時に誤って目に入れたり、飲んだりしないよう取扱いに十分注意してください。万一目に入った場合や望ましくない部位に付着してしまった場合には、直ちに十分な量の水で洗浄し、専門医の診断を受けてください。
5. チップは使い捨てです。患者ごとに交換してください。
6. プラスチックのチップは、根管から抜けなくなる可能性がありますので根管充填には使用しないでください。
7. 本品を患者の口腔内で使用する前に必ずシリンジやチップからの材料の流出状態をテストしてください。

8. 本品を抽出する際はゆっくりと一定の圧力下で行ってください。スムーズに出ない場合は、チップを交換してください。
9. 本品を根管に充填の際は、少なくとも根尖から 2mm アンダー位置から充填し、チップは根管壁に接触しないようにしてください。
10. シリンジ内の容量は複数回分あります。交叉感染を防ぐために、使用毎にシリンジを適宜消毒してください。又材料の劣化を防ぐためにもヒートシーラーで封のできるシリンジカバーを使用して保存することを強くお勧めします。
11. 本品は湿気を避け常温、暗所にて保管してください。
12. 本品は、容器又はラベルに記載されている使用期限までに使用してください。



選任製造販売業者

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル

電話番号：0120-060-751（フリーダイヤル）

製造業者

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)