

# UltraEZ<sup>®</sup>

## ウルトライーズトレイタイプ 取扱説明書

### 概要：

ウルトライーズは、硝酸カリウムおよびフッ化ナトリウムを含む粘性の高い知覚過敏抑制材で、マウスフィルムを介して使用します。

## [ 使用方法 (例) ]

使用する前に添付文書、取扱説明書を熟読し、患者にも使用方法についての説明を行ってください。



1. ウルトライーズトレイの手持ち部を、歯列の中心に合わせて装着します。



2. トレイ (外容器) の上から指で軽く押さえて固定します。



3. 外容器のトレイを外します。



4. 内容器のマウスフィルムが歯面に付着しているのを確認し、歯列外側 (唇側面) および歯列内側 (舌側面) から歯肉に向かってやさしく指で押しながら、マウスフィルムを両面から密着させます。



5. 医師の指示に従い、15分～1時間装着します。

6. 装着後、歯をブラッシングして完全にジェルを取り除き水で口腔内を濯いでください。

注意：本材を1時間以上使用しないでください。

注意：本材塗布後に異常を感じた場合は使用を中止してください。

注意：本材使用後に症状が消失したときは使用を終了してください。

## 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品の使用に関しての説明を患者に十分行ってください。
2. 就寝中の使用は本品を誤飲する可能性があるため、行わないように十分に指示してください。
3. 使用中は喫煙及び食事をしないよう指示してください。
4. 本品の使用は、1回の適用につき最長1時間までとし、処置期間は最長2週間までとします。
5. 装着後はブラッシングをして口腔内を水ですすぎ、口腔内に溜まったジェルや唾液は飲み込まないように指示してください。
6. 緑色のトレイ（外容器）は、口腔内に装着しないでください。
7. 万一誤飲した場合は大量の水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

## 【使用上の注意】

1. 使用注意
  - 1) 本品は、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
  - 2) 子供の手の届かない場所で保管してください。また、患者にもそのように指示してください。
  - 3) 使用中に誤飲しないよう指示してください。誤飲した場合は、十分な水を飲ませ、医師の診察を受けてください。
  - 4) 歯髄源性または炎症性による痛みの場合は、適用外としてください。
  - 5) ウルトライーズトレイタイプは再使用禁止。
  - 6) ウルトライーズトレイタイプのマウスフィルムは飲み込まないでください。
2. 重要な基本的注意
  - 1) 本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けてください。
  - 2) 妊娠、授乳中の女性には使用しないでください。

- 3) 皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合は石鹼と水で洗淨し、刺激が治まらない場合は医師の診察を受けてください。また、目に入った場合は、多量の水で15分以上洗淨させ、眼科医の診察を受けてください。
- 4) 本材塗布後に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 5) 本材使用後に症状が消失したときは使用を終了してください。



子供の手が届かない所に置いてください。



毒性



再使用禁止



刺激材



処方薬

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号

初台村上ビル4階

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)



© Copyright, 2012, Opal Orthodontics. All rights reserved.  
Manufactured by: 505 West 10200 South, South Jordan, Utah  
84095 USA

42300-JP.1 083112