

Antisséptico para preparo de cavidades (2101393)

**CR Descrição:** Consepis Scrub é uma pasta antisséptica a base de gluconato de clorexidina a 2,0% (em relação ao componente líquido) levemente aromatizada.

**Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:** Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e pode acompanhar também o produto pontas aplicadoras.

Seringa de 1,2ml de Consepis Scrub

Seringa IndiSpense de 30ml de Consepis Scrub




**Indicação de Uso:** Consepis Scrub é utilizado para a remoção do cimento temporário antes da cimentação definitiva e/ou para a limpeza dos desbrís do preparo simultaneamente à sua desinfecção, em apenas uma operação.

**INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO**

**Procedimento pré-tratamento:**

**A. Utilizando a seringa pré-carregada de 1,2ml:**

1. Remova o fecho Luer Lock da seringa.
2. Adapte firmemente uma ponta de aplicação descartável na seringa: Consepis Scrub: utilize uma ponta de aplicação White Mac™ Tip para aplicação na coroa. Utilize NavTip™ 29ga para entrega no canal.
3. Para obter um melhor controle, segure a seringa com o êmbolo apoiado na palma da mão, ao invés da maneira convencional com o polegar sobre o êmbolo (veja Fig. 1).

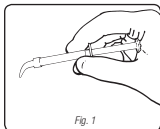

**B. Utilizando a seringa IndiSpense de 30ml:**

1. Uma seringa de dose unitária pré-etiquetada deve ser conectada à seringa grande IndiSpense por meio do fecho Luer Lock, certificando-se de que estejam firmemente adaptadas (Fig. 2).
2. Pressione o êmbolo da seringa IndiSpense com a palma da mão (Fig. 3), enquanto a dose unitária é estabilizada pela palma da outra mão não-dominante. Gentilmente puxe o êmbolo da seringa de dose unitária para facilitar o carregamento. Não devolva o conteúdo da

seringa de dose unitária de volta à seringa IndiSpense. Para prevenir contaminação cruzada, uma seringa usada não deve ser readaptada à seringa IndiSpense.

3. Coloque a tampa na seringa de dose unitária caso ela não seja utilizada imediatamente.

4. Antes do uso, adapte firmemente a ponta de aplicação recomendada na seringa de dose unitária. (Veja seção A2).

**Procedimento:**

1. Antes da cimentação definitiva, limpe totalmente o preparo com Consepis Scrub. Recomendamos a aplicação do produto com uma escova para a limpeza de sulcos profundos nas superfícies dentais (Fig.3).
2. Aplique Consepis Scrub diretamente sobre uma taça de polimento ou adapte uma ponta de aplicação White Mac Tip na seringa do produto e aplique Consepis Scrub diretamente sobre o preparo (Veja as figuras Figs. 4 e 5).

**Nota:** Caso o paciente não esteja anestesiado, mantenha a seringa de Consepis Scrub sob água morna por 10 segundos para que a temperatura do material fique próxima à temperatura corporal.

3. Cimente a coroa, inlay, etc. após o ênchuge do preparo e a remoção do excesso de água. Tome cuidado para evitar contaminação por saliva antes da cimentação.

**Nota:** Para preparos de amálgama ou resina composta, entre outros, trate as superfícies da mesma maneira que para a cimentação de corcas provisórias. Se necessário aplique uma base foradora de dentina (recomenda-se o uso de Ultra-Blend plus).

**As advertências e/ou precauções a serem adotadas com o uso do produto, previsto:**

1. As pontas de aplicação são descartáveis; não as reutilize.
2. NÃO permita que o produto seja ingerido. Recolha o material extravasado utilizando as técnicas de sucção apropriadas.
3. NÃO utilize este produto em pacientes com histórico conhecido de sensibilidade à clorexidina.
4. Utilize barreiras de proteção higiênicas para prevenir a contaminação cruzada.



Fig. 3 - Aplique com uma escova de polimento em baixo velocidade para remover o cimento temporário residual.

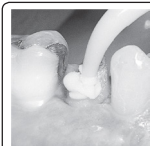


Fig. 4 - Aplique o Consepis Scrub diretamente sobre o dente com uma ponta White Mac Tip ou sobre uma taça de borracha com ou sem a ponta.



Fig. 5 - Desinfecte e limpe em apenas uma operação. Remova todo o cimento temporário, impurzas, etc. antes da cimentação final.

**Condições para descarte:**

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

**Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:**

Consepis Scrub quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

**PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.**

**A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.**

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.**



As seringas Ultradent tem a data de validade estampada ao lado da seringa e esta é representada por uma letra e três números. A letra é o número do lote usado para a produção do produto e os números são as datas de vencimento. Os primeiros dois números são o mês e o terceiro número é o último número do ano.

**Cadastro ANVISA nº:** 80279910055

**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa  
**CRQ/ SP nº:** 04261572

**Fabricado por:**  
Ultradent Products Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.

**CNPJ:** 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantovani, 2121  
Itaici - Indaiatuba - SP  
CEP: 13340350  
0800 773 5100

**Importado e distribuído por:**  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)