

Pasta para profilaxia e polimento dental (2101305)

❏ Descrição e Indicações: Ultradent® Diamond Polish é uma pasta branca, com sabor de menta, disponível em duas granulações: 1µm e 0,5µm. Ambas contêm partículas de diamante em uma base aquosa. É utilizado para o polimento de restaurações cerâmicas e restaurações de resina composta. Pode ser utilizada de forma intra-oral e extra-oral.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:
Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Seringa de 1,2mL de
Diamond Polish 0,5µm



Seringa de 1,2mL de
Diamond Polish 1,0µm



Indicação: É utilizado para o polimento de restaurações cerâmicas e restaurações de resina composta. Pode ser utilizada de forma intra-oral e extra-oral.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO

Procedimento:

A. Para o polimento de cerâmicas:

1. Esculpa e dê o acabamento em todas as superfícies da peça com as pontas, taças e discos Jiffy (Registrado separadamente) (Fig. 1).
2. Remova o fecho Luer Lock da seringa. Conecte firmemente uma ponta de aplicação Mini tip (registrada separadamente) na seringa.
3. Para obter um melhor controle, segure a seringa com o êmbolo apoiado na palma da mão (Fig. 2), ao invés da maneira convencional com o polegar sobre o êmbolo.
4. Aplique uma pequena porção da pasta Diamond Polish com um disco de feltro (Fig. 3). Para o polimento final, aumente velocidade da peça de mão e utilize um forte spray de água enquanto realiza o procedimento polidor.
5. Faça a lavagem final com um forte spray de água.

B. Para o polimento de resinas compostas:

1. Esculpa e dê o acabamento de todas as superfícies com as pontas taças e discos Jiffy (registrado separadamente). Utilize tiras abrasivas conforme necessário.
2. Aplique a pasta Diamond Polish com uma escova macia ou disco de feltro.
3. Lave e seque as superfícies.



Fig. 1 - Utilize brocas carbide e/ou diamantadas finas, as pontas, discos e taças Jiffy e/ou tiras de acabamento para contorno e acabamento final da restauração.

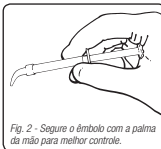


Fig. 2 - Segure o êmbolo com a palma da mão para melhor controle.

Condições de armazenamento, transporte e manipulação:
Manter o produto a temperatura ambiente (18 a 27°C).

Precauções e cuidados:

1. Apenas para uso profissional.
2. Revise as instruções, precauções e MSDS antes de iniciar o tratamento. Utilize apenas conforme as instruções do fabricante.
3. Mantenha os produtos afastados do calor e/ou da luz solar direta.
4. Evite a exposição da pele com as resinas.
5. Isole materiais químicos fortes da área de tratamento.
6. Confirme que o paciente não apresente alergia aos materiais de tratamento.
7. Teste o escoamento do material antes da utilização intra-oral.
8. Nunca force o êmbolo de seringas.

Advertências:

1. Nos recomendamos o uso de barreiras protetoras higiênicas de seringa para prevenir a contaminação cruzada.
2. As pontas de aplicação são descartáveis. Reprocessamento proibido.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.
- Proibido reprocessar.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde.

Ultradent Diamond Polish quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.



Fig. 3 - Pasta aplicada em uma pasta de polimento, utilize baixas velocidades com o contra-ângulo de baixa rotação sem água.



VALIDADE (42 MESES)



NÚMERO DO LOTE



CIUDADO, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (16°C a 27°C)



CIUDADO



NÚMERO DO CATÁLOGO



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO



PROIBIDO REPROCESSAR



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

As seringas Ultradent tem a data de validade estampada ao lado da seringa e esta é representada por uma letra e três números. A letra é o número do lote usado para a produção do produto e os números são as datas de vencimento. Os primeiros dois números são o mês e o terceiro número é o último número do ano.

Cadastro ANVISA nº: 80279910056

Responsável técnica: Claudia Cavaní Kurozawa
CRU/ SP nº: 04261572

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantbanelli, 2121
Itaici – Indaítuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br