

BR Descrição: Ultra-Blend® plus é um exclusivo material de base para forramento, radiopaco, fotopolimerizável e que apresenta adesão à dentina, contendo hidróxido de cálcio e hidroxapatita de cálcio em uma base de dimetacrilato de uretano (UDMA). Ultra-Blend® plus está disponível nas seguintes cores: dentina e branco opaco. É uma resina de alta carga (considerando que se trata de forramento) com contração e absorção de água mínimas. Ultra-Blend® plus tem viscosidade maior do que os forramentos convencionais, eliminando a necessidade de aplicador tipo bola.


Acompanha o produto: Pontas Black Micro® Tip. A quantidade de pontas irá depender da apresentação comercial adquirida.

Indicação de uso: Ultra-Blend® plus é auto adesivo e é utilizado como revestimento de cavidade e/ou material base anteriormente à aplicação de materiais restauradores.


Procedimento Geral:

1. Use Ultra-Blend plus para uma exposição pequena sem hiperemia e junto à polpa (rosada). Para uma exposição maior e/ou polpa com hiperemia, deve ser iniciado o tratamento endodôntico.


2. Desinfecte a cavidade com Consepsis (clorexidina a 2%). Seque com cuidado e não há necessidade de enxaguar.

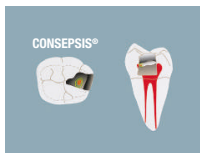

3. Aplique primeiro Ultra-Blend plus com a ponta Black® Micro Tip sobre a dentina seca na margem de exposição (ou sobre a dentina rosada fina); cubra a exposição e fotopolimerize com o fotopolimerizador LED VALO na sua potência Standard durante 10 segundos (para luzes com uma saída <600mW/cm2 polimerizar durante 20 segundos ou para luzes com uma saída >600mW/cm2 polimerizar durante 10 segundos). Mantenha dentinas saudáveis em toda a volta da área coberta com Ultra-Blend plus para posterior adesão do restaurador.

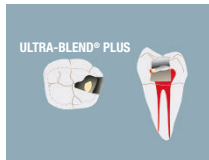

4. Faça o condicionamento ácido com Ultra-Etch®, aplique adesivo Peak® de acordo com as instruções e restaure com resina composta.

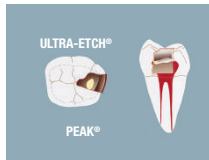

Precauções:

1. As pontas são descartáveis;
2. Recolocar as tampas nas seringas entre um paciente e outro.
3. Qualquer resina pode causar sensibilidade ao paciente, provocando reação alérgica se o indivíduo já apresentar sensibilidade. Lavar muito bem a área exposta para remover o material. No caso de ocorrência de dermatite, urticária ou qualquer outra manifestação alérgica, consultar um médico.
4. Recomendamos expressamente o uso dos Protetores de Seringa para promover uma barreira protetora contra contaminação cruzada.

5. Para evitar a contaminação cruzada, desinfetar e limpar a seringa com um desinfetante de nível intermediário entre utilizações e/ou utilizar uma cobertura de seringa descartável. Se for utilizada a cobertura da seringa, remover a ponta/cânula, recolocar a tampa e descartar a ponta/cânula e a cobertura da seringa.

6. Redirecionar o foco odontológico para evitar a polimerização prematura.

Armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

- Manter o Ultra Blend Plus protegido contra calor/luz solar direta.
- Conservar entre 2 e 27°C. Após aberto, conservar a temperatura de refrigeração, entre 2 e 8°C, quando não estiver em uso.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

Ultra-Blend plus quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

AS PONTAS APLICADORAS SÃO DE USO ÚNICO

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

Nota: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultra-Blend® plus e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.



ANVISA nº: 80279910025

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantovanelli, 2121
Itaici – Indaítuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br