

Controlador de Infecção em Tratamento Endodôntico (2100001)

**☒ BFI Descrição:** O Ultralcal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio radiopaca, com pH 12,5 acondicionado em seringa.

**Especificações e características técnicas do produto:** O Ultralcal XS é uma pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, acondicionado em seringa. É utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal, região apical e como curativo de demora endodôntico entre consultas.

**Indicação de uso:** O Ultralcal XS é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. O Ultralcal XS é utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal e região apical.

#### Procedimento:

- Após concluída a instrumentação do canal, remover a tampa da seringa de Ultralcal XS e conectar uma ponta NaviTip (Fig. 1).

- Aplique o Ultralcal XS próximo ao ápice, lentamente removendo a ponta em direção coronária (Fig. 2).  
- Como o material é básico, utilize com cuidado, e lave com água em abundância caso o material seja inadvertidamente despejado em alguma área indesejada.

- Aplique com uma ponta NaviTip, permanecendo ao menos 2mm aquém do ápice, certificando-se de deixar a ponta livre no sel.

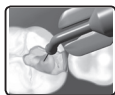


Fig. 2 - Após concluída a instrumentação inicial, o canal é preenchido com a pasta Ultralcal XS.

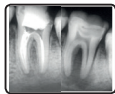


Fig. 3 - Canal antes da obturação à esquerda. 5 meses após a aplicação do Ultralcal XS à direita. Ultralcal ainda no canal.



#### Precauções:

1. Leia e entenda todas as instruções.
2. Se o paciente tiver alguma alergia conhecida ou sensibilidade química a qualquer componente do produto, este NÃO deverá ser utilizado.
3. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.
4. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.
5. O conteúdo da seringa pode ser utilizado até o término do produto, porém as pontas aplicadoras não devem ser reutilizadas.
6. Não aplique com pontas plásticas, que podem ocluir o canal (por exemplo, as pontas Capillary).
7. As seringas pré-carregadas são multidoso. Limpe e desinfete entre as aplicações conforme apropriado.
8. Recomendamos expressamente o uso dos protetores de seringa para remover uma barreira protetora contra contaminação.
9. Não ingerir o produto.

10. Tome cuidado para o produto não entrar em contato com roupas e tecidos, já que a mancha resultante pode ser de difícil remoção.

#### Armazenamento, conservação e manipulação do produto:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local protegido da poeira;
- Armazenar a temperatura ambiente;
- Não expor a temperatura extrema;
- Não permitir contato com líquidos;
- Armazenar fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva;
- Transportar os produtos de forma a evitar quedas ou empilhamento. Observar as condições de temperatura e umidade.

**Condições para descarte:** Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

**Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:** Ultralcal XS quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

**Nota:** Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultralcal XS e de outros produtos relacionados, visite: [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br).

**APENAS PARA USO PROFISSIONAL.**

**PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.**

**A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.**

**ANVISA nº:** 80279910046

**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa  
**CRQ/ SP nº:** 04261572

**Fabricado por:**  
Ultradent Products Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
CNPJ: 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaítuba – SP  
CEP: 13340350  
0800 773 5100

**Importado e distribuído por:**  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)



VALIDADE

**REF**

NÚMERO DO CATÁLOGO

**LOT**

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO REPROCESSAR



CUIDADO, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL



CORROSIVO



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ACONSELHADA (10°C a 32°C)